

Паспорт

Звуковое расписание «Школьный дневник»

Назначение

Устройство предназначено для слабовидящих и незрячих пользователей. Устройство озвучивает номера уроков, время начала и окончания уроков, дни недели, имена и фамилии преподавателей.

Описание

Устройство можно адаптировать к потребностям и возможностям пользователя, а работу можно настроить с помощью программного обеспечения. Программное обеспечение используется для составления расписания.

Характеристики

- 8 кнопок треугольной формы для выбора класса, дня недели, урока;
- круглая кнопка для воспроизведения расписания;
- разъем 3,5 мм для подключения наушников;
- регулятор громкости;
- громкоговоритель, мощность 3 Вт;
- встроенная память устройства 4 Гб;
- габариты 300×150×50 мм.

Программное обеспечение

- выбор сценарий использования устройства (школа, ВУЗ, колледж);
- просмотр информации о органах управления устройством;
- настройка шаблона расписания: выбор озвучиваемых параметров (номер урока, звонки, предмет, кабинет, преподаватель), выбор количества уроков (пар);
- библиотека звуков, предназначенная для записи, воспроизведения, удаления, хранения и распределения звуков по заданным категориям;
- составление расписание уроков;
- хранение записанных звуков и расписаний на компьютере;
- запись расписаний на USB-флеш накопитель для его дальнейшего переноса на устройство;
- включает в себя эмулятор устройства.

Комплект поставки

Устройство «Школьный дневник», USB-флеш накопитель, наушники с микрофоном, программное обеспечение, инструкция.

Эксплуатация

- Не подключайте оборудование к другим типам соединений, кроме USB-портов.
- При подключении и отключении кабеля всегда держите его за разъем. Не тяните за шнур.
- Для очистки оборудования протрите его тканью, слегка смоченной водой. Не используйте абразивные вещества.
- Избегайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, так как они могут серьезно повредить оборудование.
- Оборудование не предназначено для использования на открытом воздухе.
- В случае поломки, не стоит заниматься самостоятельным ремонтом
- Не подвергать температурному воздействию ниже - 20 °С и выше + 40 °С

Гарантия

В течение установленного законом гарантийного срока мы обязуемся бесплатно устранять путем ремонта или замены дефектов продукта, возникшие из-за дефектов материала или производственных дефектов.

Любое несанкционированное вмешательство или модификации продукта аннулируют данную гарантию.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие изделия:

- с механическими повреждениями;
- имеющие следы химического воздействия;
- подвергавшиеся самостоятельной разборке;
- подвергавшиеся воздействию повышенной температуры;
- вышедшие из строя в результате неправильной эксплуатации.

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантийный срок 12 месяцев.

При отсутствии Гарантийного талона или даты продажи гарантийные обязательства начинаются со дня выпуска изделия.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию данного изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и технические характеристики.

По вопросам обслуживания, ремонта или приобретения и сотрудничества на территории России просим обращаться в компанию ООО "ВЕДИКОР":

Адрес: Москва, пр. пр. Андропова, д.26, пом.

Телефон: +7 (495) 133-01-64

E-mail: info@vedikor.ru

Производитель: Китай, Shenzhen Feichi Hong Technology Co., Ltd.

